

Торговое название: Magic Bond.

Описание продукта:

Светоотверждаемый универсальный самопротравливающий адгезив.

Способствует максимальному сохранению тканей зуба, позволяет изолировать пульпу от действия всех типов раздражителей и добиться высоких показателей сцепления стоматологических материалов с твердыми тканями зуба.

Показания к применению:

- Адгезивная фиксация композиционных материалов, компомеров при прямой реставрации зубов
- Адгезивная фиксация вкладок, накладок, виниров и коронок)из керамики и композитных материалов при непрямой реставрации

Состав:

HEMA, диметакрилатные смолы, этанол, вода, 10-MDP фосфат мономер, фосфорная кислота, сополимер, силан, инициаторы

Способ применения:

Препарируйте зуб в стандартной технике. Чтобы защитить прилегающие ткани используйте коффердам. Просушите подготовленные поверхности, обдуйте их воздухом без примесей.

Перед применением встряхните флакон. Нанесите несколько капель материала на чистый блок для замешивания. Закройте плотно бутылочку крышкой. Нанесите материал на подготовленную поверхность эмали и дентина с помощью аппликатора. Дайте материалу подсохнуть 5-10 секунд. Тщательно просушите поверхность в течение 5 секунд

Комплектация:

- флакон 6 гр – 1шт.;
- инструкция по применению – 1шт.;

Противопоказания:

В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими материалами:

Нельзя использовать вместе с прокладками, содержащими эвгенол, так как фенол препятствует полимеризации.

Меры предосторожности:

Беречь от детей!

Только для стоматологического использования!

Перед использованием наденьте подходящую защитную одежду и перчатки.

Избегайте контакта с глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Работать в защитных перчатках.

При возникновении аллергических реакций у особо чувствительных пациентов следует удалить материал и отказаться от его дальнейшего применения.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 5 ° C до 25 ° C; относительной влажности 10–95%

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Беречь от влаги.

Закройте флакон сразу после использования, чтобы избежать воздействия света.

Срок годности:

Срок годности материала 3 года. Не применять после истечения срока годности.

Утилизация

Изделие не относится к опасным отходам. Утилизировать в соответствии с общепринятой медицинской практикой и применимыми местными, государственными и федеральными законами и нормативными актами. Класс опасности для медицинских отходов с учетом

спецификации морфологического состава (в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами Российской Федерации 2.1.7.2790-10): Класс А

Производитель:

Queen Dental GmbH

Neue Straße 67, 99846 Seebach, Germany

Нэо штрассе 67, 99846 Зеебах, Германия

Телефон: +49 36929 139999

E-mail: sales@queendental.de