

**Торговое название:** WR Prep

**Описание:**

Гель для химико-механической обработки облитерированных, труднопроходимых и разветвленных корневых каналов зубов.

**Показания к применению:**

Гель WR Prep предназначен для химического и механического расширения корневых каналов, лечения непроходимых и разветвленных корневых каналов зубов. Растворяет остатки неорганического и органического происхождения в корневом канале. Нетоксичен, не вредит периапикальным тканям, прост в применении, позволяет удалить остатки девитализированной пульпы и дентина таким образом, что механическое расширение с помощью эндодонтических инструментов проводится без затруднений даже в самых узких каналах.

Смазка инструментов при химико-механическом расширении каналов

**Состав:**

Этилендиаминтетраацетат (ЭДТА, этилендиаминтетраацетат) 15% и 10% перекись водорода в водном растворе гликоля.

**Способ применения:**

Перед использованием стоматологического геля WR Prep рекомендуется изолировать зуб.

Расширьте полость зуба и очистите пульпарную камеру стерильными борами или экскаваторами, затем промойте раствором гипохлорита натрия. Смажьте инструмент для расширения канала гелем и проведите механическое расширение без усилий. В результате химической реакции раствор гипохлорита натрия начинает активно пениться, способствуя раскрытию облитерированных или узких устьев корневых каналов зуба. На этом этапе в канал вводится тонкий эндодонтический инструмент - ример или стоматологический файл. В случаях каналов со сложной структурой приступают к определению продолжительности работы и выбору образца инструмента. Предварительно размеченный инструмент должен быть изогнутым, что облегчает его прохождение. Затем инструмент смазывают гелем, вводят в канал и механически обрабатывают подготовленным стоматологическим файлом.

Рекомендуется чередовать процедуру расширения каналов с промыванием или ирригацией каналов 1-3%-ным раствором гипохлорита натрия.

Затем промойте канал дистиллированной водой с помощью эндодонтической иглы.

Внимание! Не оставляйте материал в канале!

После каждого применения шприц с гелем следует плотно закрыть крышкой.

**Комплектация:**

2 шт - шприц 9 г

1 шт - инструкция по применению

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала, аллергия. Не используйте его для других целей.

**Меры предосторожности:**

Беречь от детей!

Только для стоматологического использования!

Перед использованием наденьте подходящую защитную одежду и перчатки.

Избегайте контакта с глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Работать в защитных перчатках.

При возникновении аллергических реакций у особо чувствительных пациентов следует

удалить материал и отказаться от его дальнейшего применения.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре от 5 °С до 25 °С; относительная влажность 10-95%.

Избегайте воздействия солнечных лучей.

Защитите от влаги.

**Срок годности:**

3 года с даты изготовления.

**Утилизация:**

Изделие не относится к опасным отходам. Утилизировать в соответствии с общепринятой медицинской практикой и применимыми местными, государственными и федеральными законами и нормативными актами. Класс опасности для медицинских отходов с учетом спецификации морфологического состава (в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами Российской Федерации 2.1.7.2790-10): Класс А

**Производитель:**

Queen Dental GmbH

Neue Straße 67, 99846 Seebach, Germany

Нэо штрассе 67, 99846 Зеебах, Германия

Телефон: +49 36929 139999

E-mail: sales@queendental.de